

TENfertil Żel nawilżający dopochwowy 6 aplikatorów

Cena: 75,20 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	6 aplikatorów po 5 ml
Postać	żel
Producent/ Dystrybutor	HEALTHCARE SCIENCE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Działanie i właściwości TENfertil Żel to żel, który nie plami, zawiera środki konserwujące zgodne z przeznaczeniem, i nie zawiera parabenów, silikonów i olejów mineralnych. - Tworzy optymalne środowisko dla plemników. - Przyczynia się do utrzymania wartości pH odpowiedniej dla naturalnego poczęcia. - Pozwala uzyskać osmolarność zgodną z osmolarnością spermy. **Zastosowanie/Wskazania** TENfertil żel nawilżający dopochwowy przeznaczony jest dla kobiet borykających się z suchością pochwy, którym zależy na stworzeniu warunków sprzyjających zajściu w ciążę. **TENfertil Żel nawilżający dopochwowy - stosowanie** Produkt należy stosować w fazie owulacji, zwłaszcza w najbardziej płodnych dniach cyklu (13, 14, 15 dzień cyklu). Użyć na 5 minut przed stosunkiem płciowym. 1. Złamać plombę na końcu kaniuli jednorazowego aplikatora. 2. Wprowadzić aplikator do pochwy. 3. Naciskać aplikator aż do całkowitego opróżnienia tubki. 4. Wyrzucić aplikator. Zaleca się stosowanie produktu raz dziennie lub częściej, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować produktu przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni.